




ロタウイルスキット
ディップスティック'栄研'ロタ

検体採取方法



患者糞便を12.5mg程度採取します。

【便量の目安】

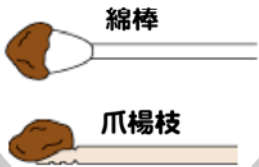

検体抽出液に懸濁します。



スティックを抽出液に30秒間浸します。



スティックを引き上げ、静置します。

反応15分

判定方法

●陽性(+):CONT部とTEST部の両方が呈色する	●再検査:CONT部が呈色しない
●陽性(-):CONT部のみが呈色する	●再検査:CONT部が呈色しない

反応時間は30分を超えないで下さい。

【使用上の注意事項】

- ・便検体を必要以上に採取しないで下さい。
- ・反応時間が30分を超えた場合は判定しないで下さい。