


スワブ輸送用チューブ **使用方法**

形状・構造

製品外観（キャップ装着時）

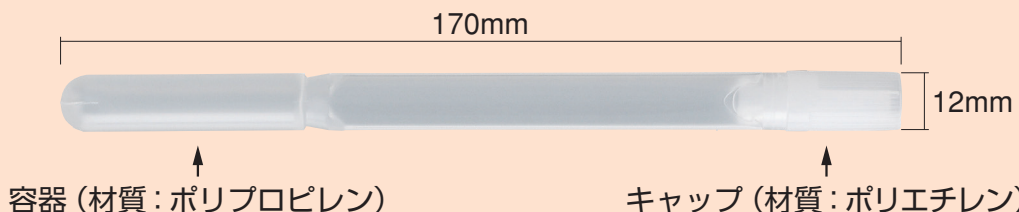


※未滅菌品

使用方法

- 1 スワブで検体を採取します。
- 2 スワブ輸送用チューブのキャップを取り外します。
- 3 キャップの内側に検体採取済みのスワブ基軸を装着します（右図参照）。
- 4 スワブを装着したキャップを容器に戻し、しっかり押し込みます。

※装着の際は、検体が付着している可能性のある部分に触れないよう注意して取り扱ってください。

スワブ基軸の装着方法

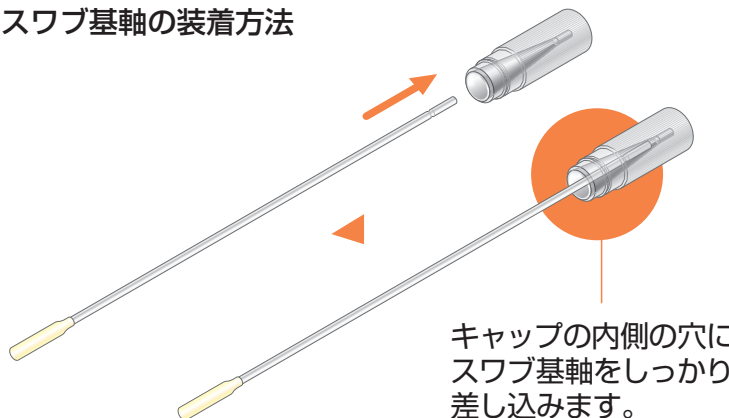

注意事項

- スワブのサイズによっては使用できない場合があります。（当社装着確認済スワブ：ニプロスポンジスワブ Type R、ニプロスポンジスワブ Type L）
- スワブを装着した状態での検体採取は、スワブが抜ける可能性があるため行わないでください。
- 検体採取後のスワブを装着した輸送用チューブは、感染の危険があるものとして注意して取り扱ってください。
- 検体を輸送する場合は、院内の輸送にとどめてください。
- 廃棄の際は、医療廃棄物等に関する規定等の各種規制に従い、各施設の責任において処理してください。

製品情報

| 製品名 | 包装単位 | 保管条件 | 製品コード |
|------------|------------------|----------------------------|--------|
| スワブ輸送用チューブ | 50本 識別ラベル：50枚 | 水濡れに注意し、直射日光を避け、 常温保存する | 8-ET08 |