

＼ 日本一やさしいうんこの検査ドリル /



栄研化学株式会社 × うんこドリル

大腸がん編

うんこの検査



うんこの検査と
大腸がんについて
よくわかる！


わかりやすい
解説イラスト付き



うんこと
うんこの検査の
コラボに成功！

うんこ先生

もんだい1

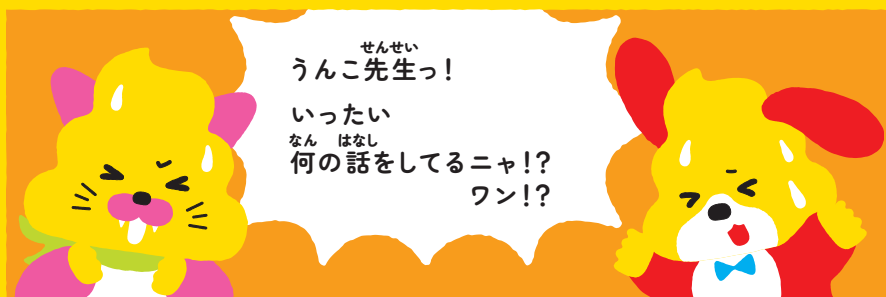

けん さ
うんこの検査!? そんな検査…

A

あるわけない!

B

せ かい
世界でうんこ先生 せん せい
だけがする!

C

じつ
実はたくさんの大人 おとな
が受けています!

D

せん せい
先生はうそをついて何に なに
かをかくしている!

おし 教え1

この世には、うんこの検査があるのじゃ!

こたえ

C

えっ

ほんとう
本当に
あるワン!?

うむ!

けんさ
うんこの検査では、
うんこをつくる
ばしょ だいちょう
場所「大腸」を
しら
調べるのじゃ!


なぜ?

うんこの検査…それはうそではなく、ほんとうにある検査
じゃ! 大人になると『大腸がん』という病気になることが
あるぞい。うんこを調べることで、早いうちに大腸がんを
み
見つけることができるのじゃ! だから、大人たちの多くは
うんこの検査を受けているぞい!

だいちょう
大腸がんって?

た もの た 食べ物を食べるとうんこになって出てくる。体の中であうんこをつくる場所が「大腸」じゃ。「がん」は
からだ なか ばしょ だいちょう
からだ ばしょ だいちょう
体から悪いデキモノの病気で、体のいろんな場所にできるが、大腸にできるがんを大腸がん
というのじゃ!

もんだい2

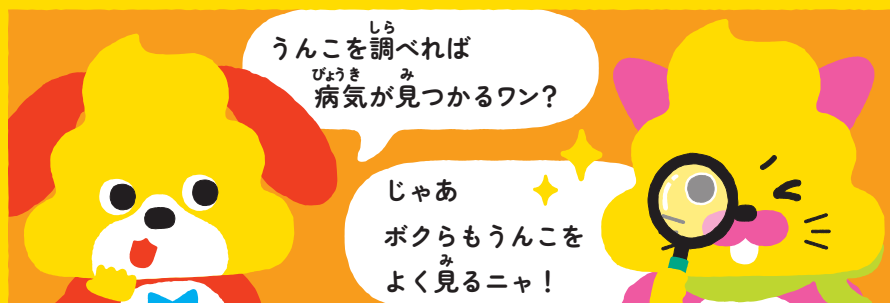

うんこにかくれた
^み
見えないメッセージとは…！？

A

なみだ
涙

B

こころ
心

C

ち
血

D

あせ
汗

おし 教え 2

うんこには、目では見えない血が
まじっているかもしれないのじゃ！

こたえ

C



なぜ？

うんこには目に見えないほどわずかな「血」がついている
ことがあるぞい。これは体の中で起きている変化を教え
てくれる大事なヒントじゃ。まさにうんこを通して体
からの見えないメッセージ！ うんこの検査は、この「血」を
見つけるもので、「便潜血検査」というぞい。

うんこについて見えない血

「大腸がん」になると、大腸がんから出た血がまじったうんこが出てくることがある。だから、血
があるか検査することで、大腸がんの可能性があるかがわかるのじゃ！ 便潜血検査では、お風
呂に垂らした一滴の血くらいわずかな量でも、見つけることができるぞい！

もんだい 3



なん
何でもないときに、
けん さ
うんこを検査するって…

A

うんこのムダ!

B

しつれい
うんこに失礼!

C

む い み
無意味!

D

ぎゃく だい じ
逆に大事!

おし 教え 3

なん
何でもないときこそ、
けん さ
検査はするべきなのじゃ！

こたえ

D




なぜ？

げん き おも からだ なか き へん か お
元気だと思っていても、体の中では気づかない変化が起きていること
があるのじゃ。だいちょう だいちよう なか からだ なん へん か
大腸がんは、できたばかりだと体に何の変化もない
ことがおお おお だいちょう み はや はや
多いぞい。そして、「大腸がん」は見つけるのが早ければ早いほ
どなお か のうせい あ びょう き なん
治せる可能性がぐっと上がる病気なのじゃ! だからこそ、「何でも
ないとき」にけん さ う からだ たいせつ
こそ検査を受けて、体をチェックすることが大切なのじゃ。

けん さ もしもうんこの検査にひっかかったら…

べんせんけつけんさ う だいちょう
便潜血検査を受けてひっかかったら「大腸がん!？」とびっくりするかもしれん。じゃが、ほんとう
だいちょう だいちよう なか み ない しきょう けん さ
「大腸がん」かどうかはそのあと大腸の中をカメラで見る(内視鏡)検査をしてわかるのじゃ。
けん さ だいちょう み けん さ じやんばん
うんこの検査→大腸をカメラで見る検査の順番でかくにんするのじゃ。

もんだい 4

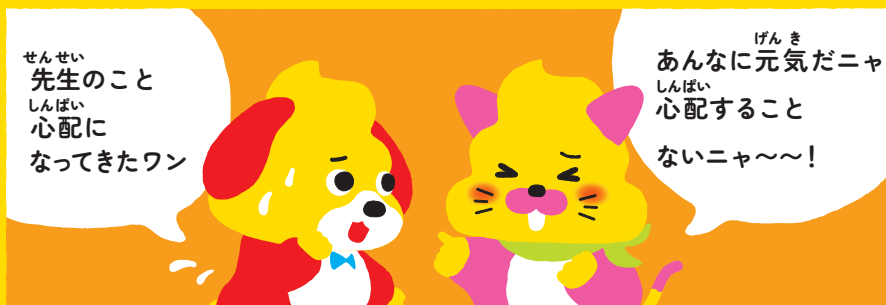

さい べん ぼう
うんこをとるときは採便棒で…

A

うんこに
いきおいよく
つきさす！

B

うんこの
ひょうめん
表面を
まんべんなく
こする！

C

うんこを
よく
かきまぜる！

おし 教え4

さい べん ぼう ひょうめん
採便棒でうんこの表面を
こすり取るのじゃ！

こたえ
B



なぜ？

め み ち ひょうめん おお
目に見えないだけで、血はうんこの表面についていることが多い
のじゃ。だから、うんこの検査では、うんこをとるための「採便棒」
という棒で、うんこの表面をまんべんなくこすり取るのじゃ！
ただ ほうほう ただ けん さ けつ か
正しい方法でうんこをとることが、正しい検査結果につながるぞい。
ほうほう さい ご み
さらにくわしい方法は最後のページを見してみるのじゃ！

ねん かい けん さ
1年に1回うんこの検査を！

だいちょう にほん いちばんおお ひと おとな とく さい だいちょう
「大腸がん」は、日本で一番多くの人がかかるがんじゃ。大人、特に40歳をこえると大腸がん
になる人がふえてくる！だから、少なくとも40歳になったら、うんこの検査を受けるべきじゃ！
ひと ひと さい けん さ う
ねん かい う たいせつ
1年に1回受けることが、とても大切なのじゃ！

もんだい5



だいじょうぶ！ うんこの検査を受ければ…

A

がんがいなくなってくれる！

B

がんを早く見つけられる！


おし 教え5

うんこの検査が大腸がんを
こわくない病気にするのじゃ！


こたえ

B

しばらくたったある日…

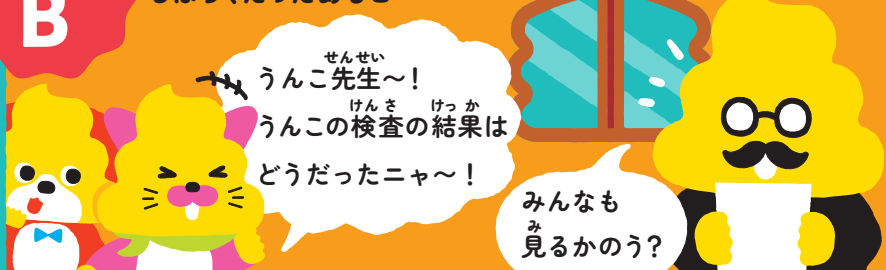


え…っ

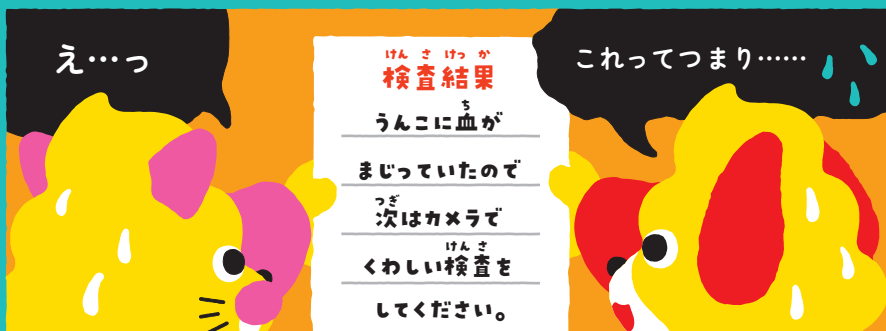

そのとおり!!



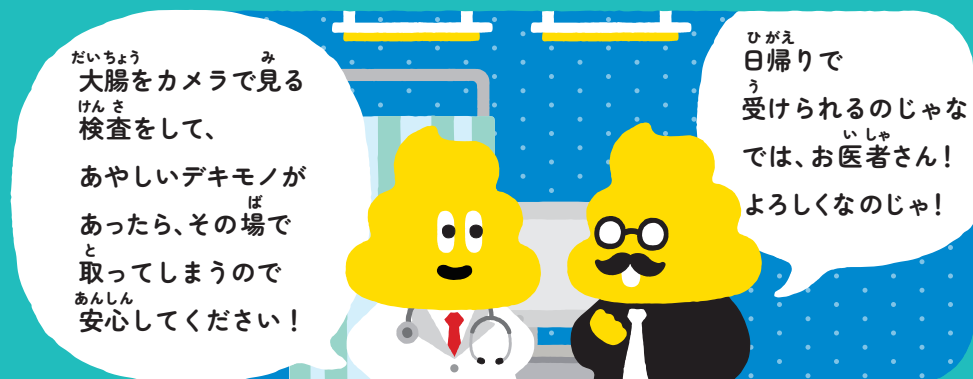


うんこの検査(便潜血)


いっしょに
うんこの検査に
チャレンジじゃ!



ひたひた

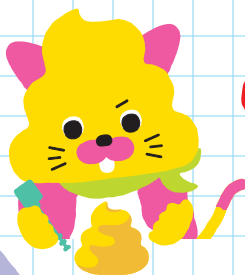


ひたひた

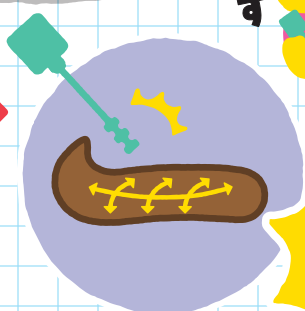

ひょうめん
うんこの表面のいろんなところを
まんべんなくこすりとのじゃ!

うんこをとる
りょう
量はみぞがうまる
くらいでOKじゃ!

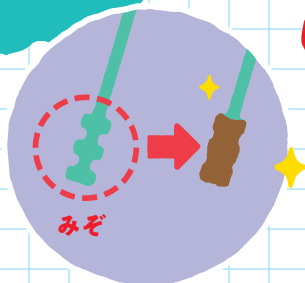


みぞ

できた!




検査)の正しいとり方

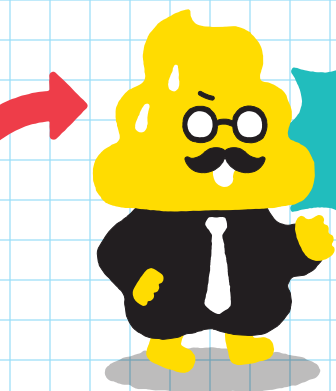

とりすぎ
じゃ！

おお
うんこを多くとりすぎると
まちがった結果が
でてしまうことがあるよ

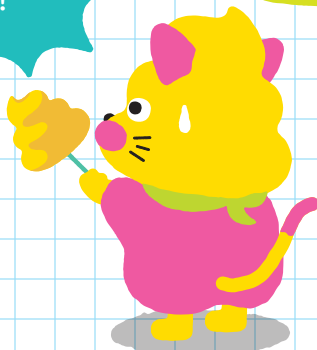

とれたニャ！

ようき
うんこをとった容器はすずしいところで保存して、
ていしめつ
はやめに提出するのじゃ！



こんなときどうする？

うんこがカチカチで
こすりとれない！



す
かた過ぎるうんこは、ちょっと水で
みず
ぬらしてからこするのじゃ！

ただ
正しくうんこを
たいせつ
とるのが大切だよ！



うんちくんと
さいべんぼう
採便棒や

おなかを
こわしているとき！



ちようし わる とき
おなかの調子が悪い時は、
どお ま
いつも通りになるまで待つるのじゃ！



栄研化学株式会社 とは

えいけんか がく けんこう え がお まも はたら しゅうだん
 栄研化学は、みんなの健康と笑顔を守るために働く“プロ集団”！
 びょういん けんこうしんだん つか けん さ びょうき
 病院や健康診断で使われる“うんちやおしっこの検査”など、病気を
 み くすり どうぐ かいしゃ
 見つけるための薬や道具をつくっている会社だよ！ [くわしくはこちら ▶](#)



うんこ うんこの検査 ドリル



い ち しき
 生きるための知識を
 うんこで学^{まな}ぶのじゃ！

QRをよみこんで、
 アプリにチャレンジ！▶

<https://world.unkogakuen.com>



監修
 医師 松田尚久
 栄研化学株式会社
 ホームページ <https://www.eiken.co.jp/>

発行
 株式会社 文響社
 ホームページ <https://bunkyosha.com>
 お問い合わせ info@bunkyosha.com