

## H採便容器

はじめてのかたち。

便を採るのに便利な容器です!



### ① 1滴目から使用可能

回転式の滴下キャップで、穿刺針が不要となり、1滴目から使用可能になりました。

### ② 開閉しやすい、オーバーキャップ

便が外に漏れにくく、開閉が容易なオーバーキャップ構造を採用しました。

### ③ 転がりにくい形状

採便キャップ部を楕円形状にすることで、容器が転がりにくくなりました。

### ④ 入口が広く、差し込みやすい

挿入口が広くなり、採便棒が挿入しやすくなりました。

### ⑤ 取り扱いやすいサイズ

細すぎず、太すぎず、滴下しやすい手頃なサイズになりました。

# 採便方法

採便方法の動画をご覧になりたい方はこちらから  
<https://youtu.be/PtbNn8oaTJQ>



## 1

ラベルをひらいて  
氏名等を記入

※必ず、採便した  
日・時を記入

※水性ペンは避ける

緑色のキャップを  
少し回して、引き抜く

※このキャップを  
開けないこと

## 2

※便をとりすぎると、  
正しい検査ができません

表面を  
まんべんなく  
こすり取る

とる量

みぞ

先端のみぞに埋まるくらい

## 3

① 緑色のキャップと容器の  
向きを合わせて、さし込む

② まっすぐ強く押す

パチンと  
最後まで  
押し込む

※1回さし込んだら、  
ぬかないこと

提出用袋に入れ、**すぐに提出**

# 検査方法

検査方法の動画をご覧になりたい方はこちらから  
<https://youtu.be/bBnNQqSzr58>



**1** 採便後の採便容器を数回、  
転倒混和する。

**2** 採便容器の透明なキャップ(滴  
下キャップ)のシールを破りな  
がら回して、キャップを緩める。

**3** 検体滴下部(S)に1滴滴下  
し、5分後に判定する。

製品名	包装単位	貯蔵方法	有効期間	製品コード
H採便容器	100回分	室温保存	1年6カ月間	E-PS20
H採便容器-A	1本入×100			E-PS21
H採便容器-B	2本入×50			E-PS22
H採便容器TP-A	1本入×100			E-PS31
H採便容器TP-B	2本入×50			E-PS32

\*本製品の使用上または取扱い上の注意については、使用説明書を参照ください