

機械器具49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器 管理医療機器 単回使用自動ランセット 37243002

かんたん採血セット'栄研'



採血に必要な穿刺器具、検体チューブ、絆創膏、 消毒布などがセットになっています————

専用遠心機*により100~150 µ Lの血液を血漿分離できます **専用遠心機は別売品です

【禁忌・禁止】


- · 再使用禁止
- ・出血性疾患や薬剤服用等により、止血機能が低下している患者への使用禁止
- ・本品の穿刺器具(自動ランセット)を用いて手指先以外の採血は禁止

採血・遠心分離

穿刺器具を指に強くあて出血させます。

検体チューブに血液をたらし遠心用キャップ(水色)をして遠心分離します。

遠心分離後、遠心用キャップ(水色)ごと中栓を一緒にはずし、輸送用キャップ(自色)をして完了です。

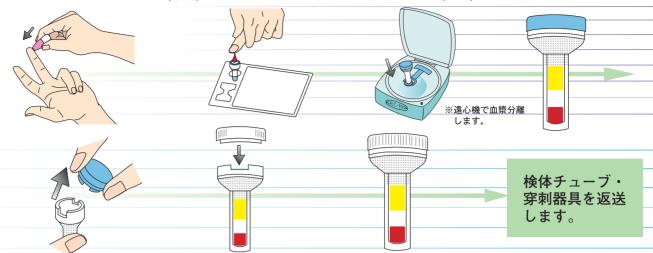

採血量の目安

血液4~5滴(100~150 µ L)で約50~60 µ Lの血漿が得られます。

注意事項

- 1. 指の上に血液が十分にたまってから(小豆くらいの大きさ)、検体 チューブに垂らすこと
- 2. 血液を検体チューブに垂らす際には、パッドに指をこすりつけないこと
- 3. 採血した検体チューブは速やかに遠心機で遠心分離すること
- 4. 輸送中に血液が漏れないように、輸送用キャップ(白色)でしっかり フタをすること
- 5. 穿刺器具(2個)は使用・未使用にかかわらず検体チューブとともに返 送すること
- 6. 採血は清潔で水平な場所で行うこと
- 7. 穿刺器具は、使用する前に保護キャップを外して先端部分を何かに 押し付けてしまうと針が作動してしまい使用できなくなるので注意す ること
- 8. 使用期限の過ぎたものは使用しないこと
- 9. 使用前に包装が汚損・破損している場合は使用しないこと
- 10. 穿刺器具を分解したり使用目的以外に使用しないこと
- 11. 穿刺器具は1回の使い捨てです。くりかえしての使用や複数人での 共用は感染の危険性があるため、一度使用した穿刺器具は必ず廃 棄すること

- 12. 刺した部分が化膿した場合は、医師に相談すること
- 13. 絆創膏または消毒布を使用した際に、アレルギー症状(発疹・発赤・ かゆみ等)があらわれた場合は使用を中止し、医師に相談すること
- 14. 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水 (温水) でよく手を 洗うこと
- 15. 果物等の糖分を含む食品等に触れた後、そのまま指先から採血す ると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるお それがある[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十 分との報告がある]
- 16. 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、 血糖値が偽低値を示すことがある
 - ・脱水状態 ・ショック状態 ・末梢循環障害
- 17. 穿刺器具は子供の手の届かない場所に保管すること
- 18. 採血後は、刺した部分をティッシュペーパー等で軽く押さえ絆創膏 を貼ること
 - ※本製品をご使用になる際は別売品の「かんたん遠心機EC-10 (医療機器届出番号:14B3X00011000002)」が必要です。


	販売名	かんたん採血セット'栄研'
	包装単位	100セット入り/箱
-	製品コード	E-DS10
	承認番号	21600BZZ00302000

匀生内灾


已衣竹台			
1.穿刺器具	2個		
2.絆創膏	1枚		
3.消毒布	1枚		
4.検体チューブ 1) 本体 バッド入り中栓(水色)がしてあります。 ※ゲル状の物質が入れてあります。 そのままお使いください。	1本		
2) 遠心用キャップ(水色)	1個		
3) 輸送用キャップ(白色)	1個		
付属品 ・検体チューブ返送用ポリ袋(印刷あり) ・穿刺器具等返送用ポリ袋(印刷なし) ・取扱説明書	1枚 1枚 1枚		

2 ケアリーワ ケアリーヴ



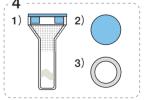

〈付属品〉

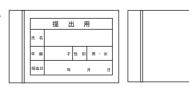

ご使用の際は、本製品に添付の「添付文書」及び「取扱説明書」を必ずご参照ください。 なお、改良・外観については予告なしに変更することがございますので、予めご了承ください。



