



便潜血キット

OC-ヘモキャッチ[®]S‘栄研’ 操作方法&判定例


操作方法

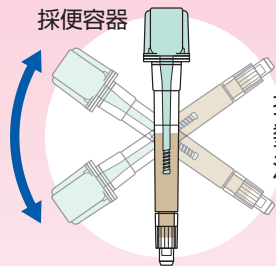

採便容器を
数回、転倒
混和する

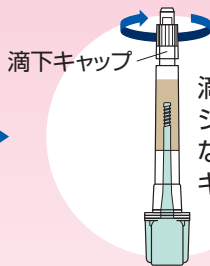

滴下キャップの
シールを破り
ながら回して、
キャップを緩める

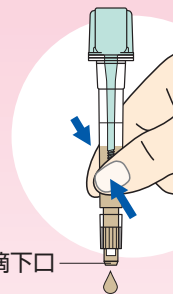

検体滴下部(S)に
1滴滴下し、
5分後に判定する



判定例



陰性(-)



陽性(+)



陽性(+)

※本試薬の使用上又は取扱い上の注意については、
製品添付文書をご参照ください。

 栄研化学株式会社

BK1

2015年10月作成