

水洗用 トレールペーパー®


水が多いタイプ

トイレットペーパーを
3~4重に折り水面に敷き、
その上にトレールペーパーを
のせてください。



水が少ないタイプ

(和式も含まます)
トイレットペーパーは
いりません。
トレールペーパーを
水面がかくれるように
敷いてください。

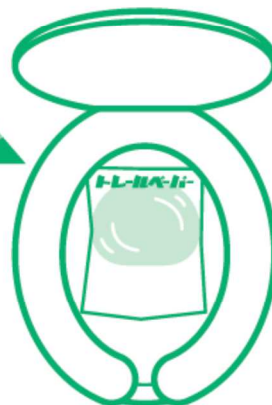

つまる原因になります！

多量のトイレットペーパーと
一緒に流さないようにしましょう。



この面が上になるように敷いて排便してください。
後はそのまま水に流せます。

使用上の 注意

- 1 使用前に濡らさないようにしてください。
- 2 使用直前に敷き、できるだけ速やかに便をとってください。
- 3 便座シャワーは便をとり終わってからご使用ください。
- 4 水にトイレ洗浄剤が混じっていると破れやすくなります。
- 5 排便の状態によっては、トレールペーパーが水に沈むことがあります。
- 6 自動洗浄機能が作動しないように注意して便をとってください。
- 7 本品は水に溶ける紙でできていますが、多量のトイレットペーパーと一緒に流すとつまる恐れがありますのでご注意ください。