

器26 医療用遠心ちんでん器

一般医療機器 汎用検査室用遠心機 36465000

かんたん遠心機 EC-10



機能

専用検体チューブ※により100~150 μ Lの血液を血漿分離できます

※本装置をご使用の際は専用検体チューブが必要です

7000回転/分、約2000Gの高性能

特徴

持ち運びや輸送に適した小型・軽量化を実現

誰にでも扱える簡単操作です。スイッチを入れるだけで内蔵タイマーにより自動停止します

運転中にフタをあけると自動停止する安全設計

乾電池を採用、特殊な電源は必要ありません
(繰り返し使用し電池が消耗すると、警告灯が点灯します)

遠心分離時の重量調整の必要がありません

サイズ



寸法

奥行き	幅	高さ
105.0mm	96.0mm	58.5mm

重量

本体	電池装着時
200g	245g

使用方法(概略)




専用検体チューブ[®]を遠心機にセットします。



フタを閉めてスイッチを入れると遠心分離が始まり、3分弱で自動停止します。



血漿分離完了。

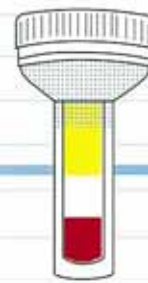

輸送用キャップにつけ替えます。



提出するまで冷暗所(冷蔵庫など)に保管します。

注意事項

- 1.かんたん遠心機 EC-10は分解しないこと
- 2.かんたん遠心機 EC-10は使用目的以外には使わないこと
- 3.専用検体チューブ[®]以外は使用できません
- 4.かんたん遠心機 EC-10は、子どもの手の届かない場所に保管すること
- 5.かんたん遠心機 EC-10は、清潔・水平な場所で使用すること
- 6.かんたん遠心機 EC-10は、繰り返し使用し電池が消耗すると警告灯が点灯するので、その場合は新しい電池と交換すること

※本装置をご使用の際は専用検体チューブが必要です

【禁忌・禁止】

誤った方法または禁止されている方法で使用すると、人的、物的及び環境的損害につながる場合があります。

- ・指定された試料以外には使用しないこと。
- ・揮発性・爆発性の試料を使用しないこと。
- ・使用チューブは必ずフタ付のものを使用すること。
- ・回転が完全に停止するまで上蓋を開けないこと。
- ・感染性の疑いのある試料を使用する場合は、作業者や周辺環境への感染を防止する対策を考慮すること。
- ・感染性の疑いのある試料が、遠心室内に飛散したときは、上蓋を開けずに「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成16年3月16日、環産産発第040316001号)」に従って処理すること。
- ・発煙、異臭、異音の発生、新品電池に交換してもモーターが回転しないなどの異常が発生したり、破損した場合はただちに次の作業を行うこと。
 - ①直ちに電源スイッチを切る。
 - ②電池を遠心機から取り外す。
- ・本装置を分解、改造及び加工しないこと。

ご使用の際は、本装置に添付の「添付文書」及び「取扱説明書」を必ずご参照ください。
なお、改良・外観については予告なしに変更することがございますので、予めご了承ください。

販売名	かんたん遠心機 EC-10
包装単位	1台
製品コード	M - 4 L 0 8
届出番号	14B3X00011000002

付属品：アルカリ単3乾電池2本

販売元



栄研化学株式会社

〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木 143番地

製造販売元

株式会社サガミ

〒230-0011

神奈川県横浜市鶴見区上末吉3丁目3番30号

6100 FK2

2008年4月作成