

便座に
通すだけ、
快適採便!

べんとりくん[®]

ハンモックタイプの採便シート



うんちくん[®]

ハンモック
タイプのため、
セットが簡単です。

ほぐれ性と耐水性を
兼ね備えているため、
採便後すべて流せます。

排便部中央が
くぼんでいるため、
水様便でも
採便が可能です。

和式便器にも
使用することが
できます。

空中トラップするため、
トイレトイレットペーパーを
敷く必要は
ありません。

空中トラップするため、
血尿や便器洗浄剤の
影響を受けにくい
設計です。



「べんとりくん®」の使用方法

1

採便シートを広げます。排便部中央のノリ付けは、はがさないでください。


2

便座を持ち上げ、排便部が上になるように通します。


3

便座の一番奥にセットしてください。


1

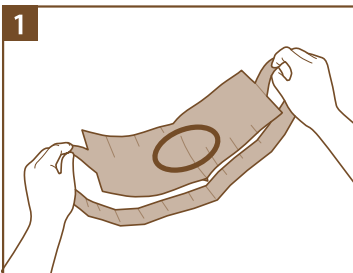


2

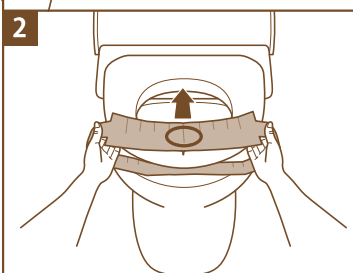


3

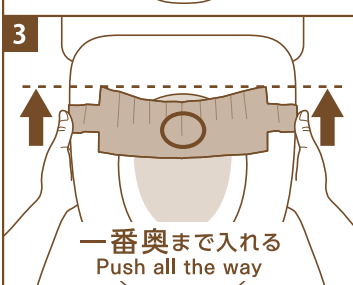


4

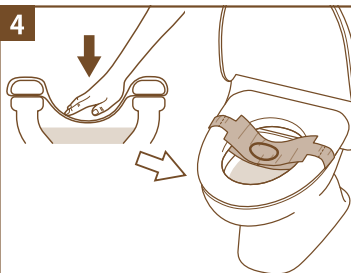

5

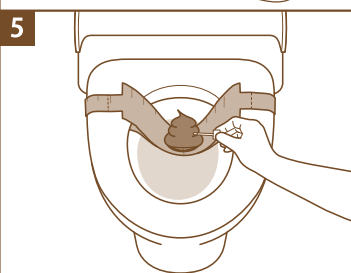

6

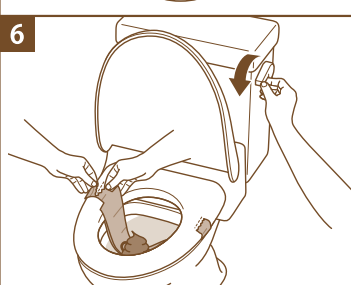

4

排便部の○印と帯部が触れるまで押してくぼみを作ります。

5

便座にすわり排便し、採便します。

6

採便後、両方のキリトリ線部分を切り、便器内に落とし、水を流します。



ENGLISH



使用方法のアニメーションが見られます
You can watch the animation of usage.

日本語



使用上の注意

- ◆自動洗浄機能の作動に注意して採便してください。
- ◆採便シートはできるだけ水や尿でぬらさないでください。
- ◆女性の方はできるだけ排尿後に採便シートをセットしてください。
- ◆おしり洗浄は採便後採便シートを便器内に落とした後に使用してください。
- ◆和式便器には採便シートを広げ敷いて使用してください。
- ◆詰まるおそれがありますので多量のトイレトペーパーと同時に流さないでください。少しおいてから水を流すと流れやすくなります。
- ◆便座の一番奥にセットしてください。

■ 品名・包装単位・貯法・製品コード

製品名	包装単位	貯蔵方法	製品コード
べんとりくん®	600枚 X 1	室温保存	E-PB10



販売元



栄研化学株式会社

〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木 143 番地

6182 CN3

2024年9月作成